



КРАТКО РЪКОВОДСТВО

български

Послойна естетика - минимални усилия

Понастоящем Jensen предлага два комплекта MiYO системи за естетическо завършване: MiYO Liquid Ceramic System за зъби и MiYO pink Liquid Ceramic Gingival System за гингива и текстура. Двете системи са уникални завършващи системи, изработени от пастообразни опалесцентни и флуоресцентни материали за послойно нанасяне на цветовете, структурата и глазура.

ПОДГОТОВКА

- Преди да нанесете материала, повърхността трябва да бъде добре почистена.
- Повърхността може да се mine на песъкоструйник с 50 μm и 2 бара налягане.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


- Не изливайте изплувалата течност в бурканчето. Смесете я до постигането на паста.
- Винаги смесвайте MiYO Color, MiYO Structure глазура преди работа с безметална шпатула.
- Пастообразният материал не трябва да влиза в контакт с вода.
- Винаги използвайте чиста и суха четка.

ОБРАБОТВАНЕ

- Нанесете материала върху предварително подготвената повърхност според предназначението ѝ.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте при температура от +12°C до +38°C.

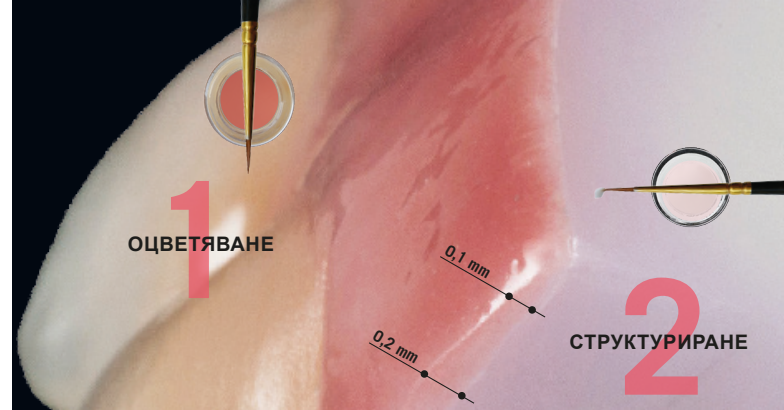

ПАРАМЕТРИ НА ИЗПИЧАНЕ* (валидно за всички изпитания)

	ZrO ₂ **	PFC (InSync Zr)	Прес върху цирконий	Литиев Дисиликат
Температура на празен ход [°C]	450	450	450	450
температура на сушене [min]	2	2	2	2
време за затваряне [min]	4	4	4	4
стартова температура [°C]	450	450	450	450
стартване на вакуума [°C]	620	620	600	600
скала на нагряване [°C/min]	45	45	45	45
температура на приключване [°C]	720	720	720	710
край на вакуума [°C]	720	720	720	710
време за задържане [s] ***	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
време за отваряне [min]	1	1	1	1

* Изброените температури на изпичане са стандартни и могат да варират в зависимост от вида на керамичната фурна.

** За много членни мостове от ZrO₂, ние препоръчваме да увеличите температурата с 10 - 20°C.

*** В зависимост от желаният блясък, времето за задържане трябва да бъде 30-60 секунди.